

# ¿CÓMO LAVAR CORRECTAMENTE SU INHALOCÁMARA?



**1**

Desarme la inhalocámara completamente.



**2**

En un recipiente, mezcle 3 litros de agua caliente (40°) y una cucharada (15ml) de jabón líquido para vajillas.




**3**

Sumerja las piezas en el recipiente hasta que queden cubiertas y mezcle para generar espuma. Deje reposar por 5 minutos.



**4**

Enjuague las partes de la inhalocámara en el grifo con agua tibia (15°) por 3 minutos.

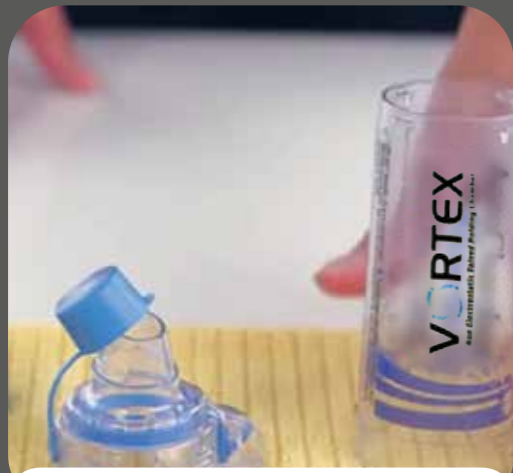

**5**

Deje secar al medio ambiente, en posición vertical, sobre un paño limpio y sólo para este fin.



**6**

Ensamble nuevamente su cámara y está lista para el próximo uso.

- NO DEBE USAR ALCOHOL, SUSTANCIAS O LIMPIADORES ABRASIVOS.
- DEBE LAVAR SU INHALOCÁMARA UNA VEZ A LA SEMANA.
- NO DEBE GUARDARSE HÚMEDA.

- NO DEBE SECARLA CON UN PAÑO CAUSANDO FRICCIÓN.
- EVITE EXPONER AL SOL O CALOR SU DISPOSITIVO.
- ESTA INHALOCÁMARA ES DE USO INDIVIDUAL.

 **CONTÁCTANOS AL: 098 724 3258**

